



VALBENNE SA



DISPO 05



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Einweg Behälter für die Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen.

Modell entwickelt für Arbeitsstationen, wo wenig Abfälle produziert werden (Pflegetablett, Wagen, Arztpraxis, Privathäuser)

- ▶ **Verschluss:** Ovale Öffnung
- ▶ **Rohstoff:** Umweltfreundlicher Kunststoff (Polypropylene Copolymer mit Cadmiumfreiem Masterbatch gefärbt)
- ▶ **Farbe:** Gelb
(Material mit schwermetallfreiem Masterbatch gefärbt)
(REACH-Konform)
- ▶ **Wandstärke:** Seitenwände: 1,55 mm - Deckel: 1,52 mm
Klappe: 1,53 mm - Boden: 1,50 mm
- ▶ **Form:** Zylinderform
- ▶ **Gewicht:** 64 gr.
- ▶ **Maximale Befüllung:** 250,00 gr.
- ▶ **Volumen:** 0,500 Lt.
- ▶ **Aussenmass:** Ø 83 x 151 mm H (mit geschlossenem Deckel)



LOGISTISCHE DETAILS:

- ▶ **St pro Karton:** 187 St (mit geschlossenem Deckel)
- ▶ **Verpackungsmass:** 60x40x36 H cm
- ▶ **St pro Palette:** 4488 St
- ▶ **Palettenmass:** 120x80x228 H cm

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ▶ ADR Konform - UN Zulassung
- ▶ TRBA 250
- ▶ NFX 30-500
- ▶ Kite Mark: Konformität ISO 23907

ANWEISUNGEN:

► Montage:

Stark auf die Oberfläche des Deckels drücken, bis alle Raster eingehackt sind.



► Provisorischer Verschluss:

Der Behälter kann provisorisch geschlossen werden: man soll die kleine Lasche der Klappe an den Raster befestigen.

► Endgültiger Verschluss:

Der Behälter kann endgültig geschlossen werden: man soll die Klappe stark drücken.



GEBRAUCHANLEITUNGEN:

- Während des Gebrauchs, schliessen Sie den Deckel provisorisch.
 - Wenn der Behälter voll ist, schliessen Sie den Deckel endgültig.
- Breite Öffnung für die Entsorgung verschiedener Abfalltypen, z.B. Teströhrchen, Skalpell, u.s.w.
 - Der Behälter kann auf 134° für 18' autoklaviert werden
 - Wenn der Behälter voll ist, muss er verbrannt werden. Bei der Verbrennung werden keine giftigen Gase freigesetzt.



► Nadelentsorgung:

Benutzen Sie die "V"
Einschnitte für die
Nadelentfernung



Führen Sie den Pennadel in den Blumeneinschnitt,
sperren Sie den Stift mit einer Bewegung unten
nach oben, dann abschrauben Sie.



ZUBEHÖRE:

- Saugnapfhalterung
- Tischtablette mit spezifischem Raum für Dispo 0,7
- Wandhalterung



VORTEILE:

- Sicher, einfach zu gebrauchen und zu handhaben.
- Falls Sie versuchen, den Behälter nach dem endgültigen Verschluss wieder zu öffnen, reisst die Lasche ab.
- Stich-und-schnittfest
- Mit Griff ausgestattet
- Deckel mit spezieller Öffnung für die Nadelentnahme.
- Auf 134 ° autoklavierbar (mit Bewahrung der Eigenschaften des Gesetztes NFX 30-500)
- Angabe der maximalen Füllungshöhe
- Endgültiger Verschluss
- Halterungen zur Verfügung
- Entsorgung bei Verbrennung, ohne giftigen Gase freizusetzen.

SICHERHEITSVORSCHLÄGE:

- Verwenden Sie den Behälter vor dem Aufbau nicht
- Versuchen Sie nicht, die entsorgten Materialien nach der Entsorgung zu entnehmen
- Überschreiten Sie nicht die maximale Füllungsmenge
- Verschliessen Sie den Behälter nur mit dem dazugehörigen Deckel
- Versuchen Sie nicht, den bereits endgültig verschlossenen Behälter wieder zu öffnen
- Folgen Sie den Sicherheitsanweisungen
- Entsorgen Sie nach den geltenden Rechtsvorschriften
- Nutzen Sie den Griff zum Transport des Behälters