

Montage und Verwendung des Sharpsafe 5L / 7L



Tun



1 Klappen Sie die Dual Protect Pro™ klappe nach innen in die offene Position, **bevor Sie den Deckel anbringen.**



2 Befestigen Sie den Deckel (4 Klicks), sodass das **Etikett und die Fülllinie des Deckels auf derselben Seite liegen.**



3 Halten Sie den Deckel immer **in vorläufiger Schließung zwischen zwei Anwendungen.**



Nicht tun



1 Den Dual Protect Pro™ **nicht einklappen, wenn der Behälter bereits in Gebrauch ist.**



2 Gebrauchte Medizinprodukte **niemals aus größerer Höhe oder aus der Ferne in den Behälter werfen oder fallen lassen.**



3 Behälter zwischen den einzelnen Anwendungen **niemals offen stehen lassen.**